



THUISZORG
WINKEL



V.J. Geert Descamps, Beverensestraat 68B, Ardooie



Maakt in
slechts
5 seconden
pillen tot
poeder!


SEVERO



THUISZORGWINKEL[®]
kwaliteit voor het leven

Severo elektrische medicijnvermaler

De Severo elektrische medicijnvermaler maalt medicatie - in een afgesloten systeem - tot stof in slechts 5 seconden zonder fysieke (over)belasting en zonder gevaar medicatie in te ademen.

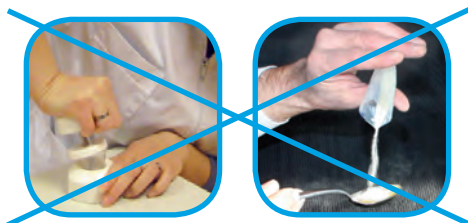

VOORDELEN

- Vermaalt medicatie in 5 seconden tot stof
- Voorkomt overbelasting aan schouder, nek, elleboog en pols
- Geen aerosolvorming (inademen van medicatie)
- Vrijwel geluidloos
- Zeer eenvoudig in gebruik, ook bij sondevoeding
- Past op iedere medicijnkar
- Inclusief handig opbergbakje en dispenser
- Zeer gebruiksvriendelijk

EIGENSCHAPPEN

- Kunststofuitvoering met metalen binnenwerk
- 12Volt DC motor
- Gewicht ca. 8200 g
- L 23cm - B 18cm - H 30cm
- Oplaadbaar en mobiel te gebruiken



ZO EENVOUDIG WERKT HET

Stap 1



Leg de medicatie en alle benodigheden klaar op de medicijnkar.

Stap 2



Doe de medicatie in de SeveroCup en zet de propere metalen stamper in de medicijncup.

Stap 3



Zet de cup met de stamper op het plateau en sluit het deurtje. In vijf seconden wordt de medicatie vermalen.

Stap 4



De medicatie is vermalen. Open het deurtje en neem de medicijncup met de stamper uit het apparaat.

Stap 5



Doe pudding, appelmoes of een andere dikke vloeistof in de medicijncup bij de vermalen medicatie.

Stap 6



Meng de medicatie goed door de vloeistof. Er vindt geen aerosolvorming plaats.

Contacteer je Thuiszorgwinkel voor bijkomende informatie.
www.thuiszorgwinkel.be