

beensteun voor rolstoel

Bedankt om deze beensteun te ontlenen via Goed thuiszorgwinkel. We geven je graag aanwijzingen en nuttige tips om het toestel op een correcte en veilige manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.



wat huur je bij Goed?

linker- of rechterbeensteun of beide

Deze beensteun kan je apart huren wanneer je been extra ondersteuning nodig heeft in je gehuurde rolstoel.

aansluiten beensteun op rolstoel

- 1 Bevestig de beensteun. Op het voorziene buisje aan de zijkant van de rolstoel haak je de beensteun in. Draai de steun naar binnen tot je een klik hoort.
- 2 Pas indien nodig de hoogte of hoek van de beensteun aan door aan de hendel te trekken.
- 3 Klap de kuitplaat en het voetplaatje open. Het voetplaatje kan je verstellen met een inbussleutel.
- 4 Om de beensteun af te nemen, druk je de hendel aan de beensteun naar beneden. Draai de steun vervolgens naar de buitenkant. Nu kan je de beensteun eruit heffen.

stap 1



stap 2



stap 3



stap 4



tip

Heb je de beensteun niet meer nodig? Breng die dan terug naar een Goed thuiszorgwinkel. We zetten de huur van de beensteun dan stop.

Goed is er voor iedereen

Goed thuiszorgwinkel

🌐 www.goed.be/thuiszorgwinkel
☎ 03 205 69 29
📦 uitleendienst: www.goed.be/uitleendienst

Goed apotheek

🌐 www.goed.be/apotheek

onze webshop is altijd open

🛒 Bestel en reserveer 24/7 op www.goed.be/webshop. Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak snel en gemakkelijk een afspraak

🌐 www.goed.be/afspraak
☎ 03 205 69 29

🗣️ Vragen over het juiste gebruik? Bel ons op 03 205 69 29.
We helpen je graag verder.