




koudetherapie hilotherm

voor het sneller genezen van
wonden en een vermindering
van pijn tijdens je herstel

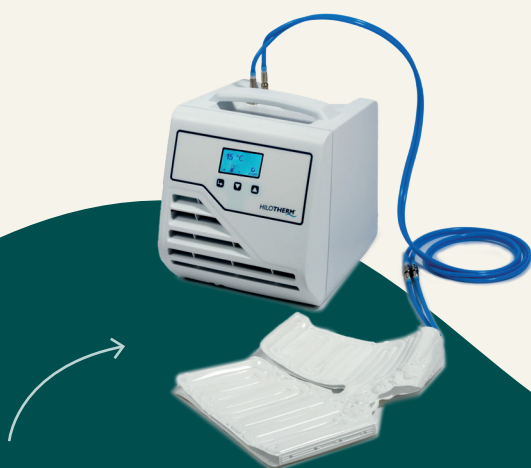

Wil je dit toestel huren?

Dit toestel wordt via een externe leverancier afgeleverd. Reservatie gebeurt via Goed. Kom langs in een van onze vestigingen om de levering van het hilothermtoestel in te plannen. Je kan het ook telefonisch reserveren via 03 205 69 29.

Na een operatie in je aangezicht kunnen zwellingen ontstaan die de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen van en naar het weefsel in je gezicht belemmeren. Hierdoor kunnen doorbloedingsproblemen ontstaan en kan het weefsel opwarmen. Hilotherapie zorgt voor afkoeling van het weefsel.

Om de getroffen delen in je gezicht te behandelen, kan je de temperaturen instellen tussen 15° en 22°. Deze koudetherapie **versnelt het herstel** van het getroffen weefsel, **verzacht de pijn** en controleert of **vermindert zwellingen en onderhuidse bloedingstoringen**.

- Het hilothermtoestel bekommt een verkoelend effect door tot op de graad nauwkeurig gekoeld water door een anatomisch gevormd verbandmasker te laten stromen.
- De hilothermbehandeling kan je thuis gemakkelijk verderzetten met een **mobiel hilothermtoestel**. Dat toestel kan je reserveren via Goed en is eenvoudig te bedienen.
- Het koelend aangezichtsmasker waar het temperatuurgecontroleerd water doorheen stroomt, is eenvoudig aan te brengen. Let op: dit **aangezichtsmasker** wordt om hygiënische reden niet verhuurd. Het masker kan je apart aankopen. Bij de aflevering van het toestel krijg je informatie over de juiste werking van dit masker.

gebruiksaanwijzing hilothermtoestel

1. Controleer of het toestel en de bijhorende accessoires in goede staat zijn en geen tekenen van beschadiging vertonen. Merk je toch beschadiging, contacteer dan zo snel mogelijk de leverancier.
2. Plaats het toestel voor gebruik op een vlak en hard oppervlak zoals een stoel, tafel, kastje ...
3. Zorg ervoor dat niets de in- en uitstroom van lucht kan blokkeren. De vrije ruimte rond het toestel moet steeds minstens 20 cm zijn. Ook boven het toestel moet minimum 10 cm vrije ruimte zijn.
4. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk te bereiken stopcontact in de buurt is.
5. Richt de ventilatieopening niet op de patiënt.
6. Vul het waterreservoir met gedestilleerd water. Voor een gezichtsmasker heb je ongeveer 400 ml nodig. Als er onvoldoende water aanwezig is, zal het toestel na het inschakelen een foutmelding geven.
7. Stop de stekker in het stopcontact.
8. Schakel het toestel aan met de hoofdschakelaar achteraan het toestel.
9. Het toestel voert een interne test uit en zal daarna een geluidssignaal geven. Het menu verschijnt op de display.
10. Sluit het gezichtsmasker aan op de blauwe darm en koppel de darm aan het toestel.
11. Bedien de pijltjestoetsen om de gewenste temperatuur in te stellen.
12. Druk op 'start'.
13. Controleer of het water effectief door het masker stroomt.



tip

Plaats het toestel niet in de zon. Niet rechtstreeks, maar ook niet achter glas. De temperatuur van het toestel kan daardoor te hoog oplopen waardoor er mogelijk geen efficiënte koeling ontstaat.

Heb je vragen over dit toestel?
Dan verwijzen wij je graag door naar Kinerent.

Kinerent

☎ 0495 99 24 80

✉ info@kinerent.be

🛒 www.kinerent.be/verhuur

Goed thuiszorgwinkel

☎ 03 250 69 29

🛒 www.goed.be/uitleendienst

🛒 www.goed.be/webshop

goed
thuiszorgwinkel