

tips & tricks

praktische tips voor gebruik

- Zet de remmen vast tijdens transport van de lift.
- Trek na het opladen de stekker uit het stopcontact.
- Stop de handbediening als je hem niet gebruikt tussen de duwbeugel en het bakje van de noodstop.
- Bel naar Goed thuiszorgwinkel als het sleutelsymbool oplicht op de display (symbool voor periodiek onderhoud).
- Verwittig na het resetten zeker onze uitleendienst. Extra aandacht is nodig om te vermijden dat de tillift na een aantal keer resetten blokkeert.

wat te doen bij problemen

Mijn handbediening werkt niet meer:

- Is de accu nog genoeg opgeladen?
- Staat de rode noodknop ingedrukt? Draai de knop naar rechts totdat je een klik voelt.
- Zit de fiche van de handbediening los?
- Stond er tijdens het laden spanning op het stopcontact? Is de stop in je meterkast afgesprongen?

De lift rijdt niet:

- Staan alle remmen los?

Ik heb geen tilband meegekregen:

- Neem contact op met de uitleendienst.

De hefarm werkt niet meer en de gebruiker hangt in de lift omhoog.

- Trek dan aan de rode knop onder aan de hydraulische steun en laat de gebruiker langzaam zakken.

Toch nog een probleem of vraag?

Bel naar het nummer 03 205 69 29.

Je vindt dit nummer ook op de sticker op de tillift.

hier al aan gedacht?

meer comfort

- toiletstoel
- stoel met eettafel
- pyjama met rits op de rug



gemakkelijker verzorgen

- verpleegdeken
- douchestoel
- aangepast servies rood



Goed thuiszorgwinkel
www.goed.be/thuiszorgwinkel
03 205 69 29
uitleendienst: goedgeholpen.be

onze webshop is altijd open

Bestel en reserveer 24/7 op
www.goed.be/webshop.
Haal je bestelling af bij Goed
of laat ze thuis leveren.

maak kennis met onze andere diensten

Goed apotheek
www.goed.be/apotheek
Reserveer je medicijnen op
www.goed.be/webreservatie.

Goed hoorcentrum
Kom langs voor een **gratis hoortest**.
Maak je afspraak op www.goed.be/hoorcentrum
of **03 205 69 20**. Je kan nu ook een afspraak
maken voor een **videoconsultatie**.

meer info op www.goed.be

montage en gebruikerstips

actieve tillift

Bedankt om via Goed een actieve tillift te ontlenen. In deze handleiding vind je aanwijzingen en tips om de tillift correct te gebruiken. Een actieve tillift wordt gebruikt voor personen die nog zelfstandig kunnen steunen. De verplaatsing van de zorgbehoevende persoon gebeurt met assistentie van een zorgverlener. Je kan een actieve tillift gebruiken om een persoon met de hulp van een tilband vanuit een zittende positie naar een zittende houding te brengen.



+ 1 tildoeek

goed
samen met



stap 1 aanbrengen van de tilband



1 Bevestig de tilband achter de rug van de zittende gebruiker.



2 Sla de flappen op buikhoogte over elkaar.



3 Klik de gesp vast.



4 Trek de gesp aan.



5 Aan de tilband zitten 2 trekbanden. Leg deze op de schoot van de gebruiker. Als je alles tot nu toe juist hebt gedaan ziet het er zo uit.



6 Rij de lift recht voor de gebruiker.

stap 2 verplaatsen en dalen van de lift



7 Laat de hefarm zakken tot op schouderhoogte van de gebruiker. De gebruiker zet zijn voeten op de plank.



8 Rij de lift met de beensteun tegen de onderbenen aan. De knieschijf moet net boven de steun komen. Let op: dit is niet van toepassing bij elke tillift.



9 Aan elke trekband zitten lussen met kleurcodes. Hiermee stel je de lengte in van de band. Kies een kleurcode. Schuif de lus over de haak.



10 Laat de gebruiker de handgrepen vastpakken. Hijs de hefarm omhoog op een snelheid die de gebruiker fysiek kan volgen.



11 Duw op de knop links onder op de afstandsbediening om de poten van de tillift open te spreiden.



12 Rij de lift rechtvoor dicht tegen de rolstoel. Zet de rolstoel op de rem. Laat de hefarm zakken. Maak de lussen los. Neem de tilband weg.